



# Oxivir Excel® Wipe CE

## Lingettes détergentes et désinfectantes à large spectre pour le matériel médical non invasif et les surfaces non poreuses

### Description

Les lingettes Oxivir Excel Wipe CE nettoient et désinfectent en une seule étape. Elles ont un large spectre avec un temps de contact réduit grâce à la technologie brevetée de Peroxyde d'Hydrogène Accéléré. Les lingettes Oxivir Excel Wipe s'utilisent sur le matériel médical non invasif et les surfaces dures, non poreuses.

### Propriétés principales


- Bactéricide, Virucide, Levuricide
- Désinfecte en 1 minute\*
- Sécurité pour les utilisateurs et les surfaces
- Pratique avec un système prêt à l'emploi
- Sans parfum
- Les actifs se décomposent en eau et en oxygène
- Sans rinçage

### Bénéfices

- Son efficacité à large spectre apporte les plus hauts niveaux de protection aux patients/ résidents. Testé selon les normes européennes de désinfection contre de multiples pathogènes, avec une revendication virucide complète Poliovirus, Adenovirus, et Murine norovirus, efficace contre tous les virus enveloppés comme : HIV, HBV, HCV, Influenza, Vaccinia virus et Coronavirus.
- Un temps de contact court qui garantit l'efficacité désinfectante
- Excellent pouvoir détergent
- Sécurité d'utilisation pour les utilisateurs, les patients et visiteurs, non irritant pour les yeux et la peau
- Formulation AHP douce pour les surfaces pour étendre leur durée de vie
- Simple et facile à utiliser éliminant tout risque d'erreur de dosage/dilution
- Pas de risque de contamination croisée et un gain de temps non négligeable grâce aux lingettes jetables
- Convient à l'utilisation dans les zones à hauts risques infectieux

### Mode d'emploi

1. Retirer les grosses salissures.
2. Ouvrir le paquet de lingettes, prendre une seule lingette et le refermer
3. Appliquer sur la surface, s'assurer que toute la surface est humidifiée, laisser sécher
4. Changer la lingette quand elle n'humidifie plus la surface, est visiblement souillée ou en cas de changement de la surface à nettoyer

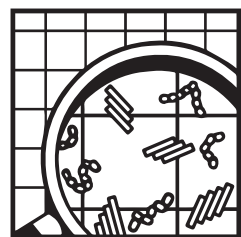

© A.I.S.E.

\*Se référer au résumé d'activité désinfectante disponible sur demande.



# Oxivir Excel® Wipe CE

## Données techniques

Aspect: lingettes polypropylène

Odour: Neutral

Valeur pH (en solution): 1.95

Densité relative (20°C): 1.000

Durée de conservation: 720 jours

*Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.*

## Recommandations pour la manipulation et le stockage

Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : [sds.diversey.com](http://sds.diversey.com). Conserver dans son emballage d'origine, à l'abri des températures extrêmes. Réagit avec les substances oxydables.

## Compatibilité du produit

Ne pas mélanger avec d'autres produits. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles à l'eau ou aux acides. Selon les recommandations d'utilisation, Diversey Oxivir Excel Wipe CE convient à tous les matériaux traditionnellement rencontrés à l'exception notable des alliages de cuivre et de zinc - se référer à notre table de compatibilité pour plus de précision.

## Données microbiologiques

Efficacité prouvée conformément aux normes: EN13727, EN13624, EN14476.

## Information environnementale

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément à l'exigence du Règlement détergent de l'UE, CE 648/2004.

## Conditionnements disponibles

Diversey Oxivir Excel Wipe CE est disponible en 12x100pc.

*Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale. La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.*